

Sikkerhet og komfort

Todelt sengegrind med fire høydenivåer

1

De vertikaldelte sengegrindene har en avrundet topplist i tre, i nederste posisjon ligger grinden ca 10 cm under madrassens overflate. Det betyr enkel tilgang for pleiepersonalet som skal utøve sine daglige oppgaver som stell og pleie av pasienten eller for eks. bytte av sengetøy.

4 nivå av beskyttelse




Ikke behov for beskyttelse



4 fordeler



Ingen barrierer

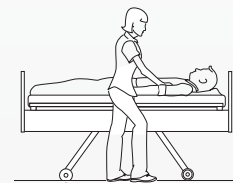


2

For sikkerhet om natten kan det være tilstrekkelig å kombinere lav posisjon av sengen med øvre del av sengegrinden i første høydenivå. Med denne "soft" løsningen unngås unødvendige hindringer for pasienten, samtidig som fallrisiko blir redusert.

Soft beskyttelse



Orientering
Frihet for pasienten

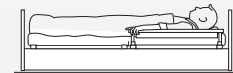


3

Med øvre del av sengegrinden i dette nivået, kan pasienten benytte grinden som støtte for å komme ut og inn av sengen. Høyde på sengeflate tilpasses pasientens kroppslengde.

3/4 beskyttelse



Mobilitet
Tilpasset pasientens kroppslengde

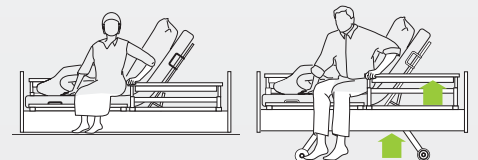


4

Med sengegrindene i øverste nivå oppnås maksimal sikkerhet for pasienten.

Full beskyttelse
For madrasshøyde fra 12 til 18 cm




Sikkerhet
Oppfyller krav til sikkerhet i ny standard IEC 60601-2-52

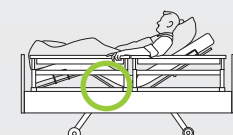

Sengeflate for trykksårforebygging

Når pasienten blir sengeliggende endres pleiebehovet. Endring av liggestilling er viktig for komfort samt for å forhindre liggesår.

Sentida sengen har en dynamisk sengeflate, med ryggtilbakeføring og automatisk forlengelse av setedel slik at man får god sittekomfort og trykkfordeling.

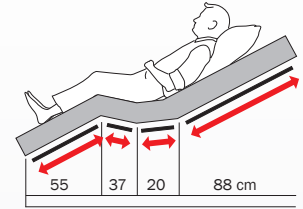

Komfort og forebygging

Komfortstilling eller forebyggende posisjon oppnås ved kun å trykke på en knapp. Økt komfort for beboer og forebygging av liggesår er til stor fordel for pasienten, samtidig reduseres belastningen for pleiepersonalet.

Komfortstilling

Den forhåndsprogrammerte komfortstillingen er praktisk for å se TV, lese, spise eller kommunisere med besøkende i øyehøyde. Å benytte personløfter er enkelt i denne posisjon. I tillegg gjør denne stillingen det lettere å puste, fordøyelsen og blodsirkulasjon forbedres.



Forebyggende

Gjennom Fowler-30° stilling med løfting av knærne, forebygges liggesår. Dette oppnås med en litt senket hodeposisjon kombinert med å løfte leggene for å avlaste hæler og ledd (f.eks med en pute plassert under leggene).



Pasient

- Brukervennlig konsept med klare symboler
- Forhåndsprogrammerte funksjoner for å unngå utilsiktede reguleringer
- Komfortstilling uten å forlate sengen



Pleiepersonalet

- 3-modus betjeningspanelet kan individuelt tilpasses den enkelte pasient
- Forhåndsprogrammerte automatiske funksjoner sparer tid




Vedlikehold/ teknologi

- Sengen har EPJ kabler som er av svært høy kvalitet, kabelbrudd og unødige kostnader unngås
- Betjeningspanel og elektronikk i ett, ikke behov for egen elektronikk

SENGER SENTIDA 3


25 cm

for fall-forebygging og sikker
posisjonering om natten

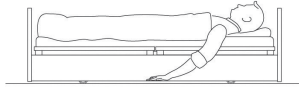


40 cm

for ergonomisk inn- og utstigning
av seng i stolhøyde

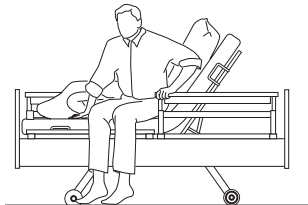

80 cm

for komfortabel og
ryggbesparende pleie

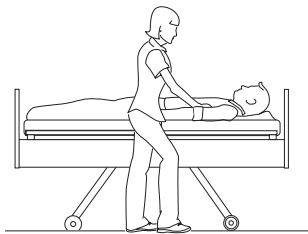

Pasient

- Pasientens sikkerhet og komfort ivaretas i alle posisjoner
- Pasienten kan forflytte seg selv fra sengen
- Innebygget sengeforlenger
- Redusert risiko ved å senke sengen til laveste nivå om natten
- Sengen stanser automatisk ved 40 cm høyde




Pleie

- Rask regulering til ønsket sengeflatehøyde
- Sikker og effektiv
- Redusert risiko for at pasient skal falle ut av sengen
- 80 cm høyde på sengeflate, korrekt arbeidsstilling for pleiepersonalet

Intelligent håndkontroll med automatiske og tidsbesparende funksjoner.

Håndkontrollen på Sentida har et ergonomisk design og en intuitiv oppbygging med store knapper. Intelligent håndkontroll med sikkerhetsfunksjon (velg funksjon og aktiver). Håndkontrollen er lett å betjene for både pasient og personale.

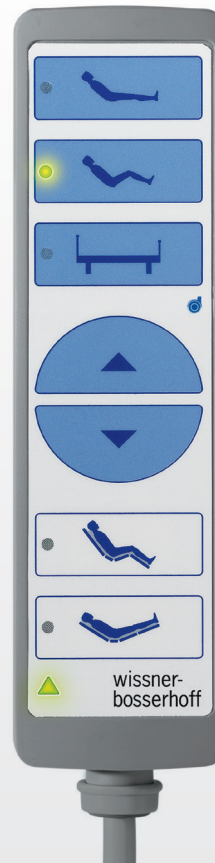

Integrert
låsefunksjon.

Håndkontroll
med tydelige
funksjoner.